

SPEICHELTEST

ABLAUFBESCHREIBUNG SPEICHELENTNAHME




1. Handschuhe anziehen, um mögliche Kontaminationen zu vermeiden.



2. Metallhülse aufschrauben und Glasröhrchen entnehmen.



3. Watteträger zur Hand nehmen und die Verpackung vorsichtig entfernen.

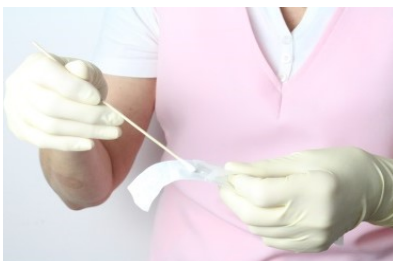

4. Watteträger an der Unterseite entnehmen.



5. Kundin bitten, den Mund zu öffnen und das wattierte Ende des Watteträgers in die Mundhöhle einführen.



6. Den Watteträger hin und her bewegen, auch an der Innenseiten der Wangen, damit genügend Speichel aufgenommen wird.



7. Den Watteträger in das Glasröhrchen geben und abbrechen.



8. Das Glasröhrchen mit dem dazugehörigen Stopfen verschließen.



9. Das Namenschild beschriften, auf das Glasröhrchen kleben, (am oberen Rand) dieses in die Metallhülse stecken und verschließen.



10. Anforderungsbogen vollständig ausfüllen und vom Kunden unten rechts unterschreiben lassen.



11. Unterschriebenen Anforderungsbogen in den Umschlag geben, diesen verschließen und per Post losschicken.

